


5 CONSIGLI D'USO

 **ATTENZIONE:** La manutenzione del MOBILIZER 3 deve essere eseguita soltanto da personale tecnico qualificato e autorizzato da SA.VIR.


LE BATTERIE

Assicurarsi che sia sempre mantenuta la piena carica della batteria. L'operatore deve sempre collegare il carica batteria quando non utilizza il MOBILIZER 3. Il carica batteria è stato progettato in modo da mantenere la batteria sempre carica.


LA SUPERFICIE SUPERIORE DI TRASFERIMENTO

- La superficie superiore di trasferimento è uno dei componenti più importanti del MOBILIZER 3; i seguenti consigli, se seguiti con attenzione dall'operatore, aiuteranno a prevenire danneggiamenti alla superficie e allungheranno la vita del MOBILIZER 3.
- Conservare il MOBILIZER 3 in un area a bassa frequentazione di personale e pazienti.
- Rimuovere dalle tasche dei pazienti che devono essere trasportati, tutti gli oggetti che possono danneggiare il telo.
- Controllare regolarmente che i bordi del tappeto superiore siano equidistanti dai lati terminali del MOBILIZER 3. Durante ogni ciclo di trasferimento effettuato con un carico, un sistema interno automatico, fa scivolare il tappeto riportandolo verso il centro del MOBILIZER 3.


PULIZIA E DISINFEZIONE DELLA SUPERFICIE DI TRASFERIMENTO

- Dopo ogni trasferimento, i tappeti devono essere puliti con una soluzione detergente proteolitico poco schiumogeno. Per avere accesso a tutta la superficie del tappeto superiore, operare nel seguente modo:
 1. Pulire la superficie di trasferimento in vista con un panno umido e detergente. Successivamente passare la superficie con un solo panno umido per rimuovere i residui di detergente.
 2. Sollevare il separatore superiore fino all'arresto meccanico.
 *Attenzione a non premere sul separatore sollevato. L'arresto meccanico non è in grado di sopportare una spinta superiore al peso stesso del separatore.*
 3. Pulire la superficie di trasferimento inferiore rimasta scoperta del sollevamento del separatore superiore.
 4. Avvicinare il MOBILIZER 3 ad un piano adatto a sostenere la superficie di trasferimento una volta estratta completamente dalla macchina.
 5. Regolare l'altezza del MOBILIZER 3.

6. Premere il pulsante USCITA PIANALE fino a quando la superficie di trasferimento è completamente estratta dalla macchina.

 *Attenzione. La superficie di trasferimento deve essere appoggiata su di un supporto adatto al suo sostegno.*


7. Sollevare il separatore superiore fino all'arresto meccanico

 *Attenzione a non premere sul separatore sollevato. L'arresto meccanico non è in grado di sopportare una spinta superiore al peso stesso del separatore.*

8. Pulire la superficie di trasferimento inferiore rimasta scoperta del sollevamento del separatore superiore.

9. Premere CARICO PAZIENTE fino al rientro completo della superficie di trasferimento.

10. Premere USCITA PIANALE fino a metà della corsa possibile.

 *Attenzione. Non eccedere oltre la metà della corsa senza un supporto adatto al sostegno della superficie estratta.*

11. Premere CARICO PAZIENTE fino al rientro completo della superficie di trasferimento.

12. Pulire la superficie di trasferimento in vista.

13. Identificare un riferimento sulla superficie di trasferimento. Il logo Savir è una buona scelta. Questo serve per capire quando tutto il tappeto superiore è transitato sul piano di pulizia.

14. Ripetere la posizione 10, 11 e 12 fino a quando il riferimento scelto ritorna in vista.

15. Ripetere dalla posizione 2 alla posizione 9.

IMPORTANTE!!!

Se sulla superficie vi è presenza di materiale liquido o organico, prima della pulizia effettuare un passaggio di decontaminazione con soluzione alcolica al 70%. Subito dopo la pulizia eseguire la disinfezione con soluzione alcolica al 70%.

CONTROLLI DI SICUREZZA

- L'operatore deve verificare almeno una volta alla settimana i seguenti punti:
 - Il funzionamento dei freni. Verificare il blocco delle ruote ed il cambio di stato dell'indicatore presente sul display frontale.
 - Il blocco verticale delle ringhiere di contenimento del paziente.
 - Verificare il blocco meccanico ed il cambio di stato dell'indicatore presente sul display frontale.
 - Il funzionamento dei sensori antischiacciamento sui coperchi inferiori.
 - Premere il coperchio inferiore e verificare il cambio di stato dell'indicatore presente sul display frontale.
 - Il livello di carica delle batterie.
 - Lo stato di usura del comando a filo.
 - Lo stato di pulizia dei tappeti.

MANUTENZIONE PREVENTIVA

- Un contatore provvede ad avvisare l'operatore quando è richiesto un intervento di manutenzione preventiva. Esso è basato su di un numero massimo di cicli di trasferimento oppure dopo 6 mesi dall'ultimo intervento di manutenzione.



ATTENZIONE

La manutenzione del MOBILIZER 3 deve essere eseguita esclusivamente da personale tecnico qualificato e autorizzato da SA.VIR S.p.A.

- Controllo delle Batterie
- Controllo delle funzioni di trasferimento
- Controllo delle parti meccaniche
- Controllo spazzole Motore
- Controllo del sistema frenante
- Lubrificazione delle parti meccaniche

Si raccomanda di eseguire la Manutenzione preventiva periodica ogni 6 mesi. Per tutti i dettagli relativi alle manutenzioni consultare il Manuale service alle pagine 70,71,72,73,74,75.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

I componenti devono essere sempre eliminati in maniera da tutelare l'ambiente, perciò lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle direttive correnti!!!

Metalli

Raccolta differenziata in base ai tipi di metallo

Conservare il MOBILIZER 3 in un'area a bassa frequentazione di personale e degenti.

Plastica

Raccolta differenziata seguendo lo schema del riciclaggio.

Parti elettriche ed elettroniche

Raccolta differenziata in base ai tipi di materiale:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - materiale per cablaggio | rottame di metallo |
| - schede elettroniche | rottame elettronico |
| - batterie | rottame di piombo |