



3 DESCRIZIONE DEL PANNELLO PRINCIPALE

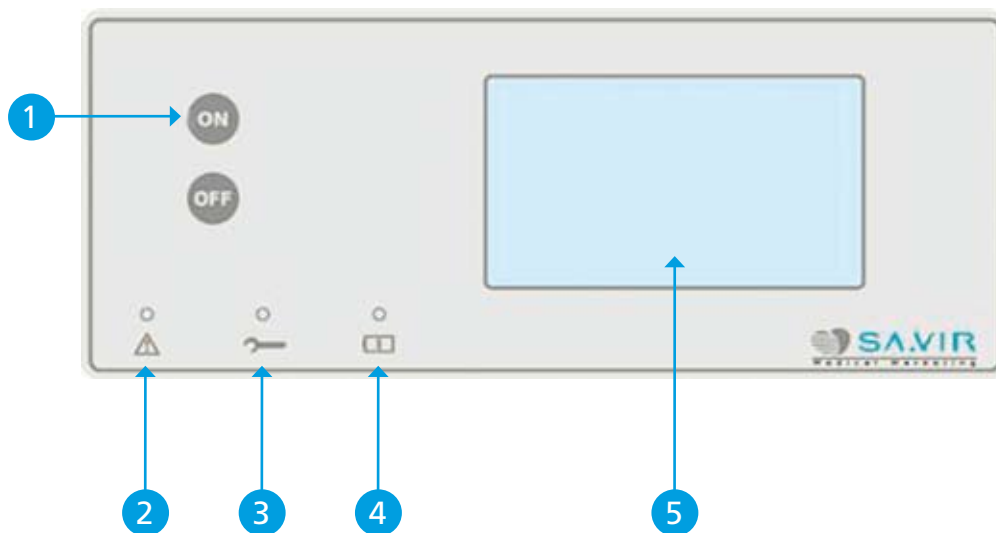

- 1 Pulsanti ON e OFF**
Premere il tasto verso ON per accendere l'apparecchiatura. Se non utilizzato per più di 5 minuti, il MOBILIZER 3 si spegne automaticamente. Premere ancora ON per ripartire. Il MOBILIZER 3 può essere indifferentemente acceso o spento durante la carica della batteria, ma deve essere acceso per ricevere indicazioni sullo stato della carica. In qualsiasi momento premendo OFF il MOBILIZER 3 si spegne.
- 2 Indicatore Allarme**
(colore rosso) - Si accende in caso di allarme.
Sul display LCD viene descritto il tipo di allarme.
- 3 Indicatore Manutenzione** (colore giallo)
Si accende quando il contatore di utilizzo del MOBILIZER 3 ha raggiunto il limite di utilizzo ed è richiesto un intervento di manutenzione preventiva.
- 4 Indicatore Carica Batteria** (colore verde)
Si accende quando la carica delle batterie è in funzione.
- 5 Schermo LCD**
Fornisce indicazioni sullo stato del MOBILIZER 3

Indicazioni su schermo LCD


Separatore Fuori	Sponda Alzata	In Carica
Oggetti Base	Freno Inserito	Manutenzione

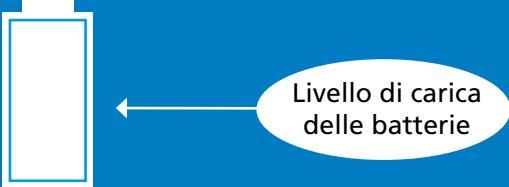

Livello di carica delle batterie


- 1 SEPARATORE FUORI**
Indica che il pianale non è completamente rientrato, premere RIENTRO PIANALE o CARICO PAZIENTE fino a che il pianale non è completamente rientrato. L'indicatore si spegne.

Separatore Fuori	Sponda Alzata	In Carica
Oggetti Base	Freno Inserito	Manutenzione




- 2 SPONDA ALZATA**
Indica che la ringhiera di contenimento dal lato paziente non è abbassata, quindi ostacola la fuoriuscita del pianale. Abbassare la ringhiera per poter operare un trasferimento.

Separatore Fuori	Sponda Alzata	In Carica
Oggetti Base	Freno Inserito	Manutenzione





3 OGGETTI BASE

Per prevenire lo schiacciamento di oggetti lasciati tra la piattaforma e la base, un sensore blocca la discesa del pianale. In questi casi, alzare la piattaforma e rimuovere gli oggetti dalla base.

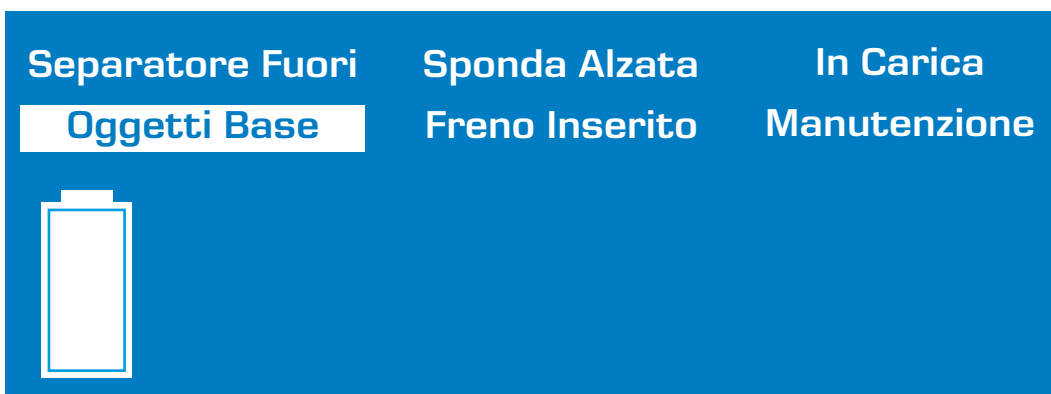

4 FRENO INSERITO

Le funzioni di trasferimento sono bloccate se non sono stati preventivamente attivati i freni.

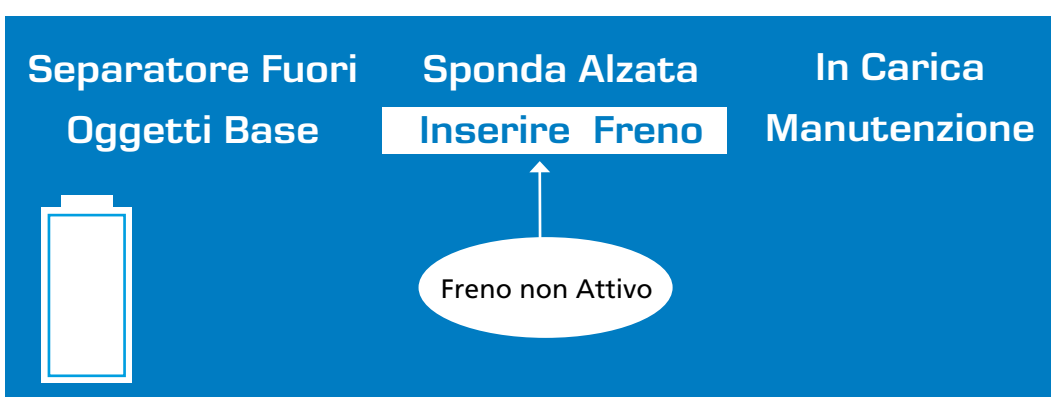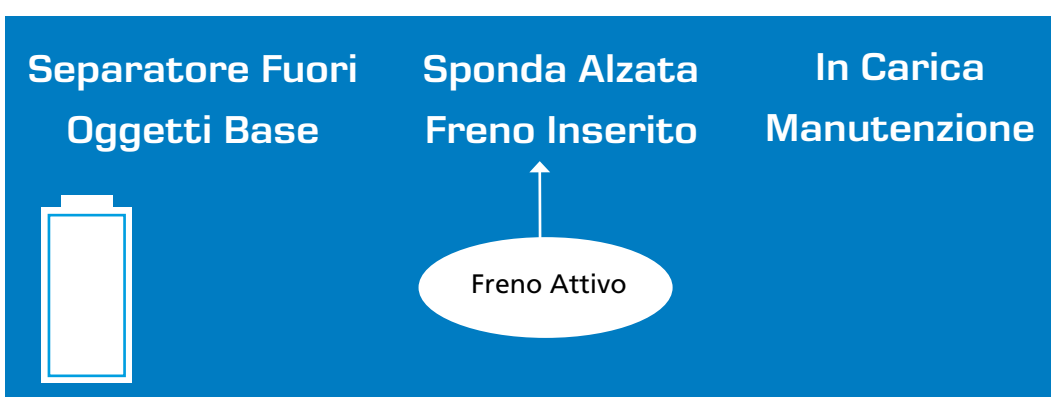


5 IN CARICA

Indica che la carica delle batterie è attiva.
Le funzioni di trasferimento sono bloccate.

Separatore Fuori	Sponda Alzata	In Carica
Oggetti Base	Freno Inserito	Manutenzione


Motori disabilitati



6 MANUTENZIONE

Indica la necessità di un intervento di manutenzione preventiva.

Separatore Fuori	Sponda Alzata	In Carica
Oggetti Base	Freno Inserito	Manutenzione




Pulsantiera comandi



1 Pulsanti in uso per scaricare il paziente




2 Pulsanti in uso per alzare e abbassare il pianale

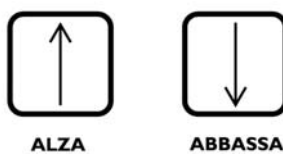


3 Pulsanti in uso per caricare il paziente



Utilizzare i pulsanti **ALZA** ed **ABBASSA** per il posizionamento verticale del pianale. Premere **ALZA** o **ABBASSA** sino ad allineare il MOBILIZER 3 alla superficie sulla quale dobbiamo lasciare o prelevare il malato. ②

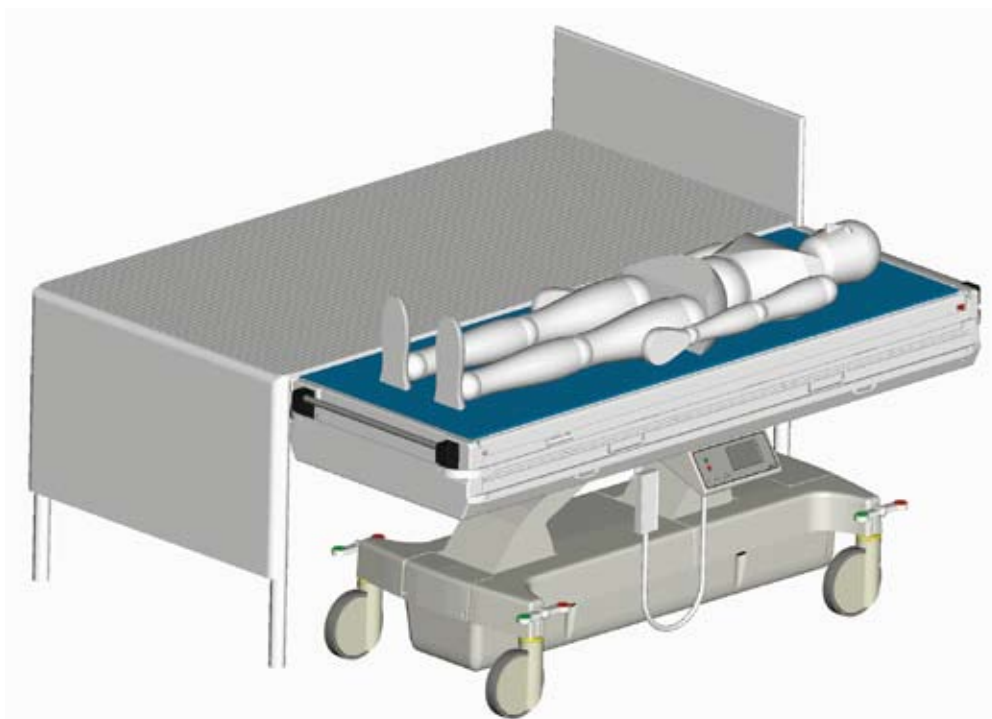

Per prelevare il paziente utilizzare il pulsante **USCITA PIANALE** in modo da far scorrere il pianale in uscita sotto il paziente e di seguito il pulsante **CARICO PAZIENTE** per richiamare il pianale con il paziente sul MOBILIZER 3. ③

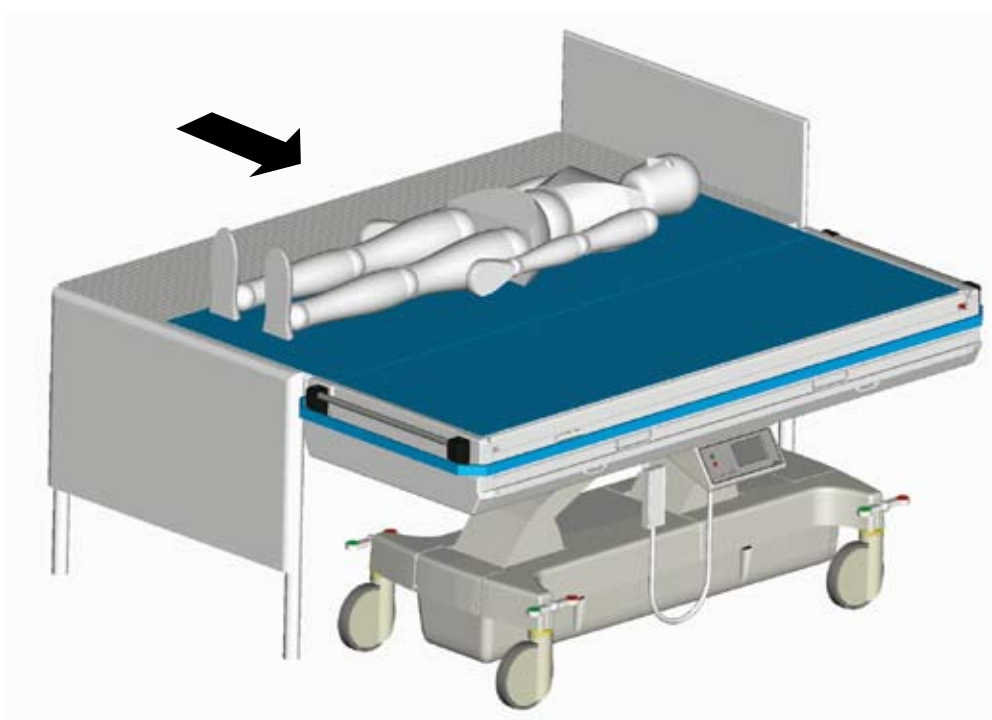

Per scaricare il paziente dal MOBILIZER 3 su un letto operatorio o di degenza premere **SCARICO PAZIENTE** per far uscire il pianale con il paziente verso il letto sul quale dobbiamo trasferirlo e di seguito **RIENTRO PIANALE** per far rientrare il pianale e scaricando il paziente. ①

