


## Operazioni da compiere per la prima messa in servizio

- Stabilire un luogo di riferimento dove riportare sempre il MOBILIZER 3 quando non viene utilizzato, in modo che tutto il personale sappia dove trovarlo. Assicurarsi che l'area scelta sia vicino ad una presa di corrente da utilizzare per la ricarica delle batterie.
- Il fusibile principale (F20A) deve essere installato perché la macchina possa funzionare.
- Collegare il caricabatteria al MOBILIZER 3 e poi alla rete elettrica. Lasciarlo collegato fino a quando la spia del carica batteria non diventa di colore verde.
- Per conservare la carica della batteria, il MOBILIZER 3 si spegne automaticamente dopo 5 minuti dall'ultimo utilizzo: premere il pulsante "ON" per ripartire.

## 2 MOBILIZER 3

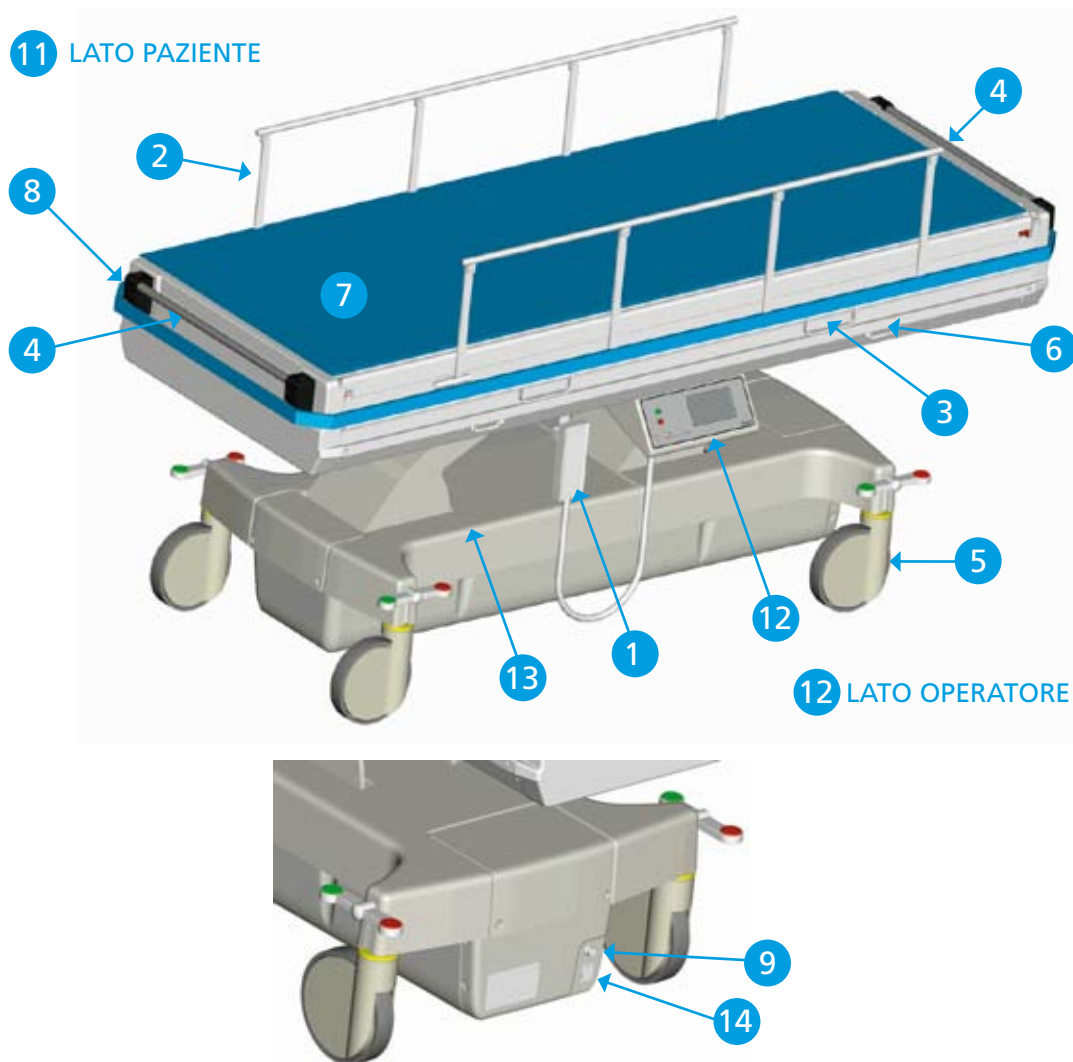

- 1 PULSANTIERA COMANDI**  
Permette all'operatore di comandare tutte le funzioni del trasferimento.  
E' connessa alla centralina da un cavo estensibile di facile utilizzo.
- 2 RINGHIERA LATERALE**  
Provvede alla sicurezza del paziente durante il trasporto. Le ringhiere non devono essere utilizzate per muovere, posizionare e guidare il MOBILIZER 3.
- 3 MANIGLIE**  
Sono presenti sui fianchi del letto, due per lato, servono per muovere, posizionare e guidare il MOBILIZER 3.
- 4 BARRA DI SPINTA**  
Sono presenti sui due lati corti del letto. Usate insieme alle maniglie (3) servono per muovere, posizionare e guidare il MOBILIZER 3.
- 5 RUOTE**  
Permettono al MOBILIZER 3 di muoversi. Se bloccate, mantengono fermo il MOBILIZER 3 durante le operazioni di trasferimento. L'operatore può scegliere tra STERZA (tappo verde) o FRENA (tappo rosso) da ogni pedale. Premendo il pedale STERZA, la ruota indicata, rimane bloccata nella sua posizione angolare, permettendo di sterzare più agevolmente. Premendo il pedale FRENA si impedisce la rotazione di tutte le ruote. Se il MOBILIZER 3 non ha i freni attivi le funzioni di trasferimento sono disabilitate.
- 6 AGGANCI PER SACCHE O DRENAGGI.** Due per lato.
- 7 SUPERFICIE DI TRASFERIMENTO**  
Consiste in due pianali e due teli che con la loro fuoriuscita e rientro provvedono al trasferimento del paziente.
- 8 FORO PER ASTA IV**  
Permettono di continuare il processo IV durante il trasporto del paziente.  
Su tutti e 4 gli angoli.
- 9 PORTA FUSIBILE**  
Il fusibile (6,3 x 32 F20A) deve essere montato al momento della prima installazione.  
Il MOBILIZER 3 viene spedito con il fusibile rimosso per preservare la carica delle batterie.
- 10 LATO OPERATORE**  
Il lato operatore è la parte dove ci sono i comandi per le operazioni di trasferimento (pulsantiera) e la centralina di controllo.
- 11 LATO PAZIENTE**  
Il lato paziente è il lato di fuoriuscita e di rientro del pianale di trasferimento.
- 12 PANNELLO CENTRALINA**  
Contiene i pulsanti ON e OFF ed un display LCD che fornisce le informazioni relative allo stato del MOBILIZER 3.
- 13 INTERUTTORI DI SICUREZZA**  
(sotto i coperchi) - Allarme posto sotto i coperchi superiori della base, che blocca la possibilità di abbassare il letto se qualche oggetto è stato posto sopra la base.
- 14 CONNESSIONE PER CARICA BATTERIA**