

CONSIGLI D'USO

Le batterie

Assicurarsi che sia sempre mantenuta la piena carica della batteria. L'operatore deve sempre collegare il carica batteria quando non utilizza il MOBILIZER^{II}. Il carica batteria è fatto in modo da mantenere la batteria sempre carica.

La superficie superiore di trasferimento

- La superficie superiore di trasferimento è uno dei componenti più importanti del MOBILIZER^{II}; i seguenti consigli, se seguiti con attenzione dall'operatore, aiuteranno a prevenire danneggiamenti alla superficie e allungheranno la vita del MOBILIZER^{II}.
- Conservare il MOBILIZER^{II} in un area a bassa frequentazione di personale e degenti.
- Vuotare completamente le tasche dei pazienti che devono essere trasportati, da oggetti che possano danneggiare il telo.
- Controllare in ogni trasferimento la posizione regolare del telo che sia cioè centrato sul pianale.
- Controllare che la superficie di trasferimento sia piatta e non presenti curvature anomale. In tal caso contattare immediatamente l'assistenza tecnica.

Pulizia della superficie di trasferimento



SI RACCOMANDA

Eeguire quotidianamente la pulizia della superficie di trasferimento come indicato nell'apposito paragrafo (Vedi sotto).

La pulizia normale va completata con una soluzione non abrasiva.

Si raccomanda di usare detergenti a base alcolica.

Usare la procedura di seguito indicata per esporre l'intera superficie del telo:

1. Pulire tutta la superficie esposta del telo. La superficie di trasferimento superiore è incernierata per permettere l'accesso alla superficie inferiore.
2. Schiacciare il pulsante *SCARICO PAZIENTE* per far fuoriuscire tutto il pianale.



Ricordarsi di estendere il pianale sopra una superficie di sostegno.

3. Come nel punto 1 pulire la superficie di trasferimento sia superiore che inferiore.
4. Schiacciare il pulsante *RIENTRO PIANALE* per richiamare la superficie dentro.
5. Ripetere i punti 2 e 4 sino a che sul pianale superiore non scorre tutto il telo.

Controlli di sicurezza

Dei controlli periodici di sicurezza devono essere effettuati ogni settimana sui seguenti punti:

- Controllare che le funzioni del pedale delle ruote e le ruote funzionino correttamente.
- Gli anelli di ancoraggio per i drenaggi e le sacche siano fissati correttamente.
- Le ringhiere di contenimento paziente devono sempre bloccarsi nella posizione completamente sollevata.

6

MANUTENZIONE PREVENTIVA PERIODICA



ATTENZIONE

La manutenzione del MOBILIZER^{II} deve essere eseguita esclusivamente da personale tecnico qualificato e autorizzato da **SA.VIR**.

- Controllo delle Batterie
- Controllo delle funzioni di trasferimento
- Controllo delle parti meccaniche
- Controllo spazzole Motore
- Controllo del sistema frenante
- Lubrificazione delle parti meccaniche

Si raccomanda di eseguire la Manutenzione preventiva periodica ogni 6 mesi.

Per tutti i dettagli relativi alle manutenzioni consultare il Manuale service alle pagine 70,71,72,73,74,75



7

RACCOLTA DIFFERENZIATA

I componenti devono essere sempre eliminati in maniera da tutelare l'ambiente, per esempio: lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle direttive correnti!!!

Metalli

Raccolta differenziata in base ai tipi di metallo
Conservare il MOBILIZER^{II} in un area a bassa frequentazione di personale e degenti.

Plastica

Raccolta differenziata seguendo lo schema del riciclaggio.

Parti elettriche ed elettroniche

Raccolta differenziata in base ai tipi di materiale:

- materiale per cablaggio	rottame di metallo
- schede elettroniche	rottame elettronico
- batterie	rottame di piombo