


DESCRIZIONE DEL PANNELLO PRINCIPALE

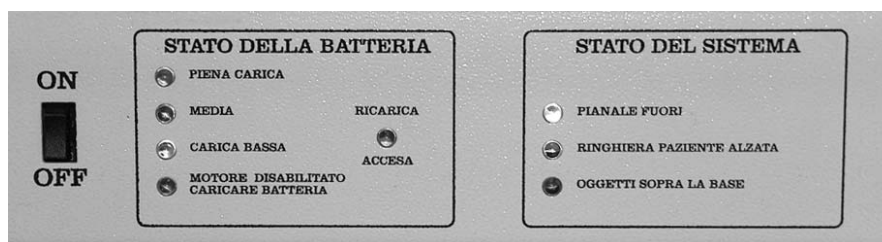

Interruttore ON/OFF

Premere il tasto verso **ON** per accendere l'apparecchiatura. Quando il MOBILIZER^{II} non viene adoperato per più di 5 minuti si spegne automaticamente. Premere **ON** per ripartire. Il MOBILIZER^{II} può essere indifferentemente acceso o spento durante la carica della batteria, ma deve essere acceso per leggere lo stato della carica.

Stato della Batteria

- **Piena carica:** Le batterie sono completamente cariche. Una ulteriore carica non è necessaria.
- **Media:** Le batterie sono cariche ma è meglio attivare la carica.
- **Carica bassa:** Le batterie sono poco cariche e devono essere caricate. L'unità non deve essere utilizzata, in quanto potrebbero non essere completate alcune operazioni attivate, o alcuni movimenti diventare imprecisi.
- **Motore disabilitato:** Le batterie sono completamente scariche ed il MOBILIZER^{II} ha i motori disattivati per proteggere le batterie da danneggiamenti permanenti.
- Lo stato delle batterie va sempre tenuto in condizioni di Piena carica collegando il MOBILIZER^{II} durante la notte al carica batteria.
- **Ricarica accesa:** Indica che il carica batteria è in funzione.

Stato dell'unità

- **Uscita pianale:** Indica che il pianale non è completamente rientrato, premere *RIENTRO PIANALE* o *CARICO PAZIENTE* fino a che il pianale non completamente rientrato.
- **Ringhiera paziente alzata:** Indica che la ringhiera di contenimento dal lato paziente non è correttamente scesa, quindi ostacola la fuoriuscita del pianale. Abbassare la ringhiera.
- **Oggetti sopra la base:** Per prevenire lo schiacciamento di oggetti lasciati tra la piattaforma e la base, un sensore ferma e disabilita la discesa del pianale. In questi casi, alzare la piattaforma e rimuovere gli oggetti dalla base.


Pulsantiera comandi




Pulsanti in uso per scaricare il malato



Pulsanti in uso per alzare e abbassare il malato

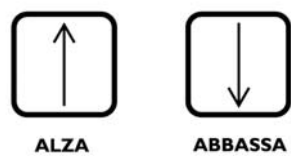

Pulsanti in uso per caricare il malato

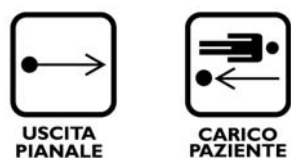


Alzare e abbassare il paziente




Utilizzare i pulsanti **ALZA** ed **ABBASSA** per il posizionamento verticale del pianale. Premere **ALZA** o **ABBASSA** sino ad allineare il MOBILIZER^{II} alla superficie sulla quale dobbiamo lasciare o prelevare il malato.

Prelevare il paziente

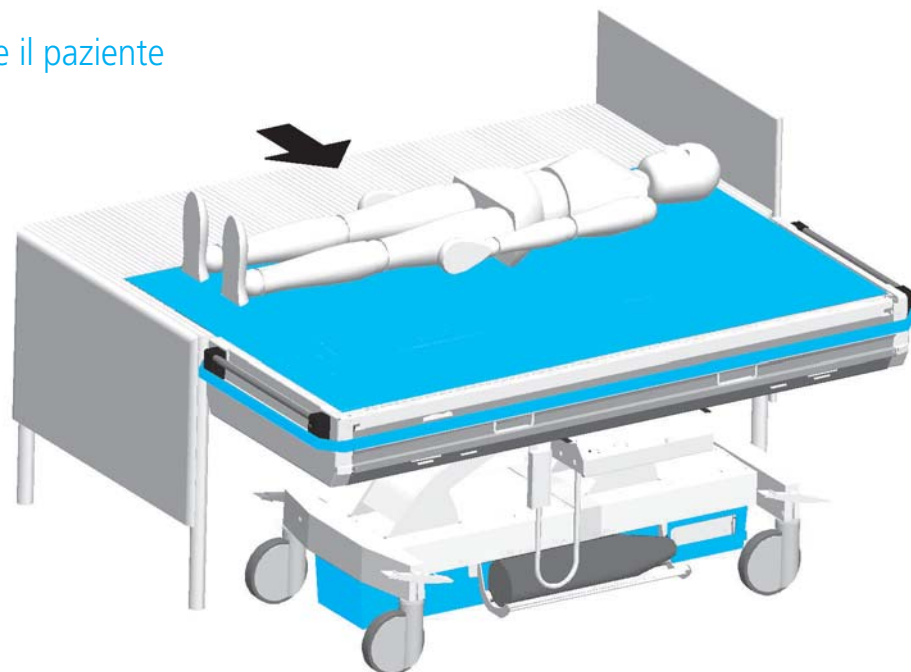

Per prelevare il paziente utilizzare il pulsante **USCITA PIANALE** in modo da far scorrere il pianale in uscita sotto il paziente e di seguito il pulsante **CARICO PAZIENTE** per richiamare il pianale con il paziente sul MOBILIZER^{II}.

Scaricare il paziente

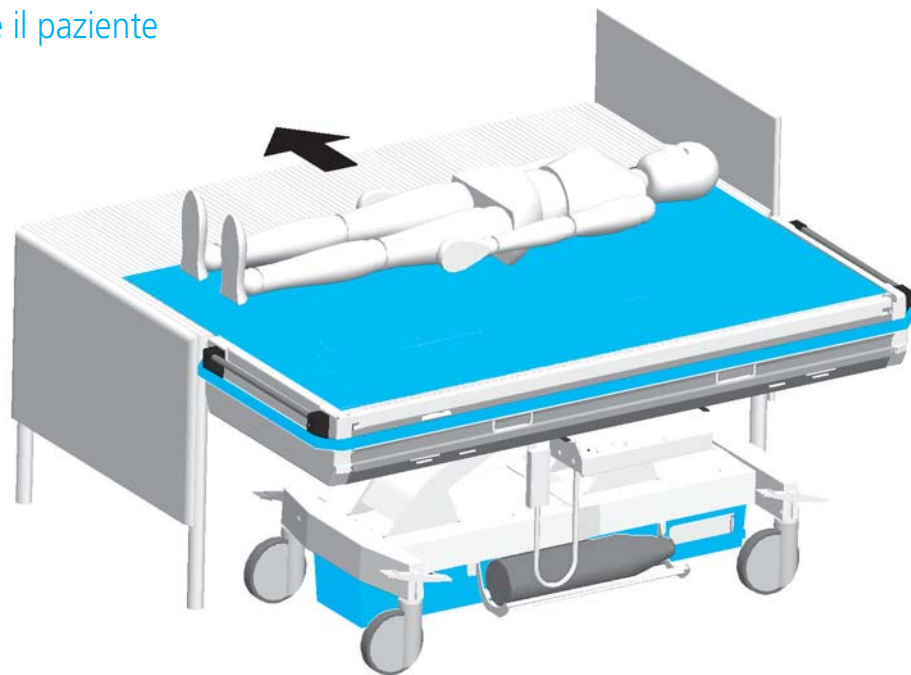

Per scaricare il paziente dal MOBILIZER^{II} su un letto operatorio o di degenza premere **SCARICO PAZIENTE** per far uscire il pianale con il paziente verso il letto sul quale dobbiamo trasferirlo e di seguito **RIENTRO PIANALE** per far rientrare il pianale e scaricando il paziente.