

MOBILIZER^{II}

1 PULSANTIERA COMANDI

Permette all'operatore di comandare tutte le funzioni del trasferimento. E' connessa alla centralina da un cavo estensibile di facile utilizzo.

2 RINGHIERA laterale

Provvede alla sicurezza del paziente durante il trasporto. Le ringhiere non devono essere utilizzate per muovere, posizionare e guidare il MOBILIZER^{II}.

3 MANIGLIE

Sono presenti sui fianchi del letto, due per lato, servono per muovere, posizionare e guidare il MOBILIZER^{II}.

4 BARRA DI SPINTA

Sono presenti sui due lati corti del letto. Usate insieme alle maniglie (3) servono per muovere, posizionare e guidare il MOBILIZER^{II}.

5 RUOTE

Permettono al MOBILIZER^{II} di muoversi. Se bloccate, mantengono fermo il MOBILIZER^{II} durante le operazioni di trasferimento. L'operatore può scegliere tra *STERZA* o *BLOCCA* da ogni pedale. Premendo il pedale *STERZA*, la ruota indicata, rimane bloccata nella sua posizione angolare, permettendo di sterzare più agevolmente. Premendo il pedale *BLOCCA* si impedisce la rotazione di tutte le ruote.

6 AGGANCI PER SACCHE O DRENAGGI.

7 SUPERFICIE DI TRASFERIMENTO

Consiste in due pianali e due teli che con la loro fuoriuscita provvedono al trasferimento vero e proprio del paziente.

8 FORO PER ASTA IV

Permettono di continuare il processo IV durante il trasporto del paziente. Su tutti e 4 gli angoli.

9 RICOVERO PER ASTA IV

Ricovero per riporre l'asta IV quando non viene utilizzata.

10 PORTA BOMBOLA

Supporto con cinghia di ritenuta per il trasporto della bombola ossigeno.

11 ALLOGGIAMENTO CARICA BATTERIA

Alloggiamento del carica batteria quando non è utilizzato.

12 PORTA FUSIBILE

Il fusibile deve essere montato al momento della prima installazione. Il MOBILIZER^{II} viene spedito con il fusibile rimosso per preservare la carica delle batterie.

13 LATO OPERATORE

Il lato operatore è la parte dove ci sono i comandi per le operazioni di trasferimento (pulsantiera) e la centralina di controllo.

14 LATO PAZIENTE

Il lato paziente è il lato di fuoriuscita e di rientro del pianale di trasferimento.

15 PANNELLO CENTRALINA

Contiene l'interruttore ON-OFF, i led di stato di carica della batteria e degli allarmi.

16 INTERRUTTORE DI SICUREZZA (sotto i coperchi)

Allarme posto sotto i coperchi che blocca la possibilità di abbassare il letto se qualche oggetto è stato posto sopra la base.

17 CONNESSIONE PER CARICA BATTERIA

